


КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАЗМЕР

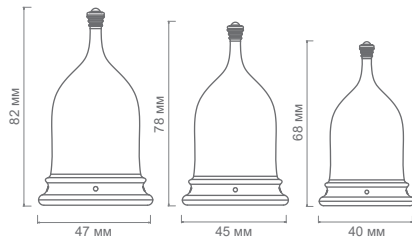

ПРИМЕНЕНИЕ



Помойте



Сложите
для легкого ввода



Сожмите
менструальную чашу



Раскройте половые
губы и введите
во влагалище



Медленно вкрутите,
расположив ручку
по прямой линии
со входом во влагалище




Удостоверьтесь,
что чаша полностью
раскрыта

ИЗЪЯТИЕ



Вымойте руки

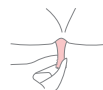

Возьмитесь за ручку,
выньте чашу
и помойте ее



Вставьте чистую
менструальную
чашу обратно

УХОД ЗА ПРОДУКТОМ

- Очищение: используйте теплую воду или антибактериальное мыло.
- Сушка: протрите продукт сухой чистой салфеткой.
- Хранение: держите в прохладном, сухом и чистом месте.
- Внимание: не используйте для очистки средства, содержащие алкоголь, бензин или ацетон.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Не используйте при температуре свыше 167°F/75°C.
- Прекратите использование при возникновении дискомфорта.
- Рекомендуется использование лубриканта на водной основе.
- Не используйте продукт, если он поврежден или неисправен.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Certificates

